

锌离子检测试剂盒（PAPS 显色剂法）使用说明书

【产品名称】

通用名称： 锌离子检测试剂盒（PAPS 显色剂法）

英文名称： Zinc Kit (Zn)

【包装规格】

规格组成	适用仪器
25mL(试剂1:1×20mL+试剂2:1×5mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M；利霸: XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
50mL(试剂1:1×40mL+试剂2:1×10mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
150mL(试剂1:2×60mL+ 试剂2:1×30mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
300mL(试剂1:4×60mL+ 试剂2:2×30mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
600mL(试剂1:8×60mL+ 试剂2:4×30mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
200mL(试剂1:2×80mL+ 试剂2:2×20mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
200mL(试剂1:2×80mL+ 试剂2:1×40mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
500mL(试剂1:4×100mL+ 试剂2:2×50mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
250mL(试剂1:4×50mL+ 试剂2:2×25mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702；东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR；美康: MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L8060、MS-L8000、MS-L7280；希森美康: CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M；雅培:C4000、C8000、C16000、Aeroset、ci4100、ci8200、ci16200；西门子: ADVIA 1800、ADVIA 2400、ADVIA XPT
12×52T(试剂1:12×17.2mL+ 试剂2:12×4.3mL)	西门子: DIMENSION RXL、DIMENSION AR、DIMENSION EXL、DIMENSION X-PAND
1×52T(试剂1:1×17.2mL+ 试剂2:1×4.3mL)	西门子: DIMENSION RXL、DIMENSION AR、DIMENSION EXL、DIMENSION X-PAND
1×200T(试剂1:1×(16mL+25mL)+试剂2:1×11mL)	罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
4×400T	
70mL(试剂1:2×28mL+试剂2:2×7mL)	
140mL(试剂1:4×28mL+试剂2:4×7mL)	麦迪卡 EasyRA
300T(试剂1:1×40mL+试剂2:1×10mL)	西门子: ADVIA 1200、ADVIA 1800、ADVIA 1650、ADVIA 2400、ADVIA XPT
270T	
390T	
2×360T	
4×360T	日立: 008AS、006、3500
2×400T	
1×400T	日立: 008AS、006、3500；罗氏: Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
1×200T	

【预期用途】

用于血清、血浆、尿液或精液中锌离子（Zn）浓度的定量测定。结果升高见于溶血性贫血、甲状腺功能亢进、锌中毒等；结果降低见于肝硬化、阻塞性黄疸、再生障碍性贫血、肾病综合征等。

【检验原理】

样本中的锌离子在室温下与试剂中的 5-Br-PAPS 形成有色复合物，颜色的深度在 400μg/dL 的范围内与锌离子的浓度成正比。

【主要组成成分】

试剂	成 分	终浓度
试剂 1	抗坏血酸	50mmol/L
	4-(2-羟乙基)-1-哌嗪-乙磺酸(Hepes)缓冲液	200mmol/L
	柠檬酸三钠	0.2mol/L
试剂 2	二水合 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-[N-n-丙基-N-（3-磺丙基）氨基]苯酚二钠盐(简称 5-Br-PAPS)	20μmol/L

不同批次的试剂不推荐混合使用。

【储存条件及有效期】

试剂 2～8℃可稳定 18 个月。夏季运输注意冷藏。不得冷冻。试剂开瓶后于2～8℃可稳定 1 个月。生产日期和使用期限见标签。

【样本要求】

1 血清、肝素抗凝血浆，避免溶血。样本于 2～8℃可稳定 8 天。

2.24 小时定量尿液， 检测前离心取上清液。

3.采集精液后置 37℃水浴箱内液化 1 小时，经离心后分离精浆进行检测。

【检验方法】

试剂配制

本试剂为液体，可直接使用。

测定条件

主波长	578nm	光径	10mm	反应方法	终点法
-----	-------	----	------	------	-----

辅助波长	800nm	温度	37℃	反应方向	向上
------	-------	----	-----	------	----

操作步骤

样本	15μL
试剂 1	240μL
混匀，37℃孵育 3-5 分钟，读吸光度值 A ₁	
试剂 2	60μL
混匀，37℃孵育 5 分钟，读吸光度值 A ₂ ，△A=A ₂ -A ₁	

全自动生化分析仪自带程序参数输入法，上述基本参数需结合该输入法，进行上机参数输入后试剂才能配套仪器自动测定。具体仪器的详细测定参数可与我公司联系。

校准程序

按照生化分析仪操作手册中的校准程序操作。建议使用本公司校准品。

1.本产品使用时一般采用两点校准。

2.校准品按其说明书操作使用；校准品用量与样本量一致。

3.生化分析仪可根据校准结果自动绘制校准曲线。

4.每 7 天或当发生以下情况时应重新校准：变更试剂批号；质控值发生显著偏移；生化分析仪进行了较大的维护。

5.各实验室可根据具体情况制定自己的校准程序。

质量控制程序

质控品按其说明书操作使用。请另行购买质控品。

建议每天进行一次质控实验。

计算

$$\text{Zn 浓度 (}\mu\text{mol/L)} = \frac{\Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}}{\Delta A_{\text{校准品}} - \Delta A_{\text{空白}}} \times C_{\text{校准品}}$$

【检验结果的解释】

仪器加样针、比色杯、管路等未清洗干净时可能对实验结果产生影响。反应曲线异常时需进行确认。干扰物质超出限度时需进行确认。溶血样本可影响检测结果。检测结果若超过线性范围，用去离子水将样本稀释，测定结果乘以稀释倍数。

【检验方法的局限性】

1.干扰物质： 血红蛋白≤5g/L， 结合胆红素≤144mg/dL，非结合胆红素≤14mg/dL，维生素 C≤30mg/dL，甘油三酯≤816mg/dL 时对检测结果无干扰。

【产品性能指标】

试剂空白吸光度：波长 578nm，光径 10mm，应≤0.3000；

线性范围：在(3.0～61.2)μmol/L 范围内：a) 线性相关系数(r)应≥0.995；

b)(3.0～20]μmol/L 范围内，线性偏差应≤4.0μmol/L；(20～61.2)μmol/L 范围内，线性偏差应≤10.0%；

准确度：相对偏差≤15.0%；

精密度：批内 CV≤4.0%；批间相对极差≤6.0%；

分析灵敏度：样本浓度为 30μmol/L 时，吸光度差值应不小于 0.0560。

【注意事项】

1.仅供科学研究使用。若不慎溅到人体表面如皮肤、眼睛等，必须用清水冲洗，如果误食则需要到医院治疗。

2.如仪器无本试剂盒所要求的波长，请选择接近的波长。

3.不可使用溶血血清；血清锌含量极少，所用器皿和试剂要避免锌离子污染。

4.使用时应做好防护措施并遵循所有实验室试剂操作的注意事项。所有废弃物应按当地法规要求处理。

5.使用前请仔细阅读说明书。