

氯检测试剂盒（硫氰酸汞法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：氯检测试剂盒（硫氰酸汞法）

英文名称：Chloride Kit(Cl)

【包装规格】



规格组成	适用机型
360mL(6×60mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 贝克曼AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800； 美康: MS-480、MS-480B、MS-880、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000； 希森美康CHEMIX-180； 罗氏MODULAR、Cobas 311、Cobas 501、Cobas 701； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
120mL(2×60mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
600mL(6×100mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
300mL(6×50mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 贝克曼 AU: AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 美康: MS-480、MS-480B、MS-880、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000； 希森美康 CHEMIX-180； 罗氏 MODULAR、Cobas 311、Cobas 501、Cobas 701； 利霸: XL-300、XL-600、XL-640； 迈瑞: BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800； 雅培 C16000
100mL(2×50mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
50mL(1×50mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
200mL(2×100mL)	日立: 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3500、008AS； 贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝: TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培C16000
1×72T(1×25.8mL)	西门子: DIMENSION RxL、DIMENSION AR、DIMENSION EXL、DIMENSION X-PAND
12×72T(12×25.8mL)	西门子: DIMENSION RxL、DIMENSION AR、DIMENSION EXL、DIMENSION X-PAND
2×300T(2×100mL)	贝克曼: LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9
80mL(2×40mL)	麦迪卡 EasyRA
160mL(4×40mL)	麦迪卡 EasyRA
3200T	西门子 ADVIA 2400
6×515T	西门子 ADVIA 2400
6×630T	西门子 ADVIA 2400
2×360T	日立008AS、3500
4×360T	日立008AS、3500
1×200T	日立008AS、3500
1×400T	日立008AS、3500

【预期用途】

用于血清中氯离子（Cl⁻）的定量测定。

氯离子主要是用于钠钾紊乱，酸碱失衡评价。血清中增高：呼吸性碱中毒、肾衰竭、肾炎少尿期。血清中减低：尿崩症、肺炎、酸中毒。

【检验原理】

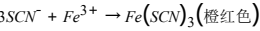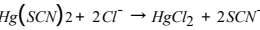

氯离子与硫氰酸汞反应，生成氯化汞和硫氰酸根离子，后者与硝酸铁反应生成橙红色硫氰酸铁，在特定波长测定其吸光度，计算出氯离子含量。

【主要组成成分】

成 分	含 量
硝酸铁	20mmol/L
硫氰酸汞	2mmol/L
硝酸	28mmol/L

不同批次的试剂不推荐混合使用。

【储存条件及有效期】

试剂在 2~8℃保存可稳定 1 年。打开包装后，2~8℃可保存一个月。生产日期和使用期限见标签。

【样本要求】

- 血清。
- 最适宜样本为当日空腹采集的无溶血、无乳糜的血清。样本在 2~8℃保存可稳定 1 周。不可使用已被污染样本。
- 干扰物质：胆红素≤320μmol/L，甘油三酯≤24 mmol/L，血红蛋白≤4g/L，抗坏血酸≤1600μmol/L 对检测结果无影响。

【检验方法】

试剂配制

本试剂为液体，可直接使用。

测定条件

主波长	450nm	比色杯光径	10mm	反应方法	终点法
副波长	700nm	反应温度	37℃	反应方向	向上

操作步骤

样本	3μL
试剂	300 μL
混匀，37℃孵育 5min，在测定波长下读取相应吸光度，计算ΔA。	

全自动生化分析仪自带程序参数输入法，上述基本参数需结合该输入法，进行上机参数输入后试剂才能配套仪器自动测定。具体仪器的详细测定参数可与我司联系。

校准程序

按照生化分析仪操作手册中的校准程序操作。建议使用本公司校准品。

- 本产品使用时一般采用两点定标。
- 按照校准品说明书操作。
- 每 7 天或当发生以下情况时，建议重新校准：变更试剂批号；质控值发生显著偏移；生化分析仪进行了较大的维护。
- 校准频率：试剂批号更换后；根据质控要求。
- 各实验室可根据具体情况制定自己的校准程序。

质量控制程序

按照质控品使用说明书操作。请另行购买质控品。

每天进行一次质控实验。

计算

$$\text{氯离子浓度 (mmol/L)} = \frac{\Delta A_{\text{样本}} - \Delta A_{\text{空白}}}{\Delta A_{\text{校准品}} - \Delta A_{\text{空白}}} \times C_{\text{校准品}}$$

【检验结果的解释】

仪器加样针、比色杯、管路等未清洗干净时可能对实验结果产生影响。反应曲线异常时需进行确认。干扰物质超出限度时需进行确认。样本浓度超过线性范围时，请用无氯的去离子水稀释后重新测定。

【检验方法的局限性】

本法对氯离子并非绝对特异，其他一些卤族元素亦能取代硫氰酸根离子，与汞离子结合生成卤素汞，同时游离出硫氰酸根离子，产生同样的呈色反应。

【产品性能指标】

线性范围：80~125mmol/L 范围内：a) 线性相关系数（r）应≥0.995；b)（80~100] mmol/L 范围内，绝对偏差应≤10mmol/L；（100~125）mmol/L 范围内，相对偏差应≤10.0%；

准确度：相对偏差≤10.0%；

测量精密度：批内 CV≤5.0%；批间相对极差≤10.0%；

空白吸光度：波长 436nm，光径 10mm，测得试剂吸光度值 A≤0.3000；

分析灵敏度：样本浓度为 100mmol/L 时，吸光度差值应不小于 0.2000。

【注意事项】

- 仅供科学研究使用。若不慎溅到人体表面如皮肤、眼睛等，必须用清水冲洗，如果误食则需要到医院治疗。
- 如仪器无本试剂盒要求的波长，请选择接近的波长。
- 试剂含有害元素汞，使用时请做好防护措施并严格执行实验操作规程。废液按环保要求处理。